

アメリカンイーグル 診査／歯周治療用

ハンドインスツルメント

GRACY



Since 1921
100 years of Quality in Dental



American Eagle
INSTRUMENTS®



材質

ステンレススチール

XP

XP Pro Thin

TALON TOUGH



「硬く鋭い鷲の爪」の意味を持つ、熱処理とアイステンパリングを施した特殊ステンレス合金です。シャープな切れ味が持続し、高いレベルの耐久性と耐蝕性を実現しました。

XPシリーズ



ブレードの耐久性試験
試験方法: 牛歯のエナメル質に100gの圧をかけて25mm幅でストローク。
ステンレススチール: 1,500回のストローク
XP: 15,000回のストローク

standard instrument vs XP series instrument

※アメリカイーグル社データ

プラズマフュージョン(特殊加工)により、ダイヤモンドのような硬い表面を持ち、耐久性がアップしました。これにより、シャープニング直後のような切れ味が持続するため、**シャープニングフリー**となっています。
※XPシリーズはシャープニングを行うことができません。

ブレード幅



10%減



10%減



ハンドル




SURE GRIP HANDLE
ハンドルには、フラットな3本リングとファインカットが施されており、濡れたグローブで握っても滑りにくく、正確な作業を行います。



※ Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

3つの形状

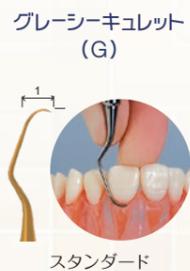

開口量が少ないケースには




グレイシーキュレット G11-12・G13-14のシャンクの角度を強くし、開口量が少なく挿入が制限されてしまう臼歯部でも操作がしやすいG15-16・G17-18をラインナップしています。

使用部位


キュレットスケーラー

- 前歯部: 00-0/1-2/3-4/5-6
- 臼歯部: 7-8/9-10
- 臼歯部(近心): 11-12/15-16
- 臼歯部(遠心): 13-14/17-18

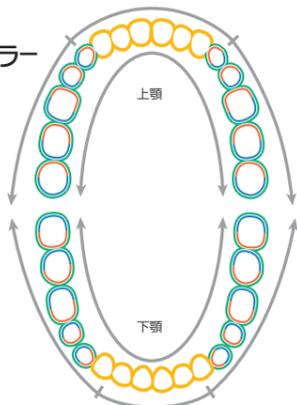

シックルスケーラー

- 前歯部: H5-33/H6-7/J4-U5
 - 臼歯部: 204S
 - 臼歯部(遠心): 204SD
 - 前歯部・臼歯部共用: M23/ブラックジャック
- ※色の表記はハンドルの色調とは異なります。

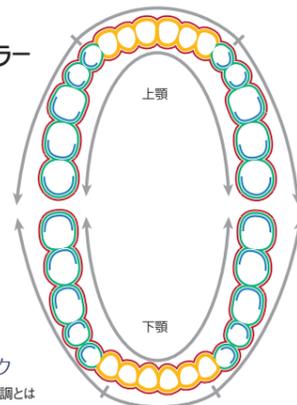

包装

- ステンレススチール S L 1本
 - X 1本
 - XP X 1本
- 歯周用キュレット グレイシー キュレット
一般医療機器 13B1X00155000071
- 歯周用キュレット XP グレイシー キュレット
一般医療機器 13B1X00155000254

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP
	S	L	X	X
G1-2	70009634	70009623	70010360	70010835
G3-4	-	70009624	70010361	70010836
G5-6	70009636	70009625	70010362	70010837
G7-8	-	70009626	70010363	70010838
G9-10	70009638	70009627	70010364	70010839
G11-12	-	70009628	70010365	70010840
G13-14	70009641	70009630	70010366	70010843
G15-16	70009642	70009631	70010367	70010844
G17-18	70009644	70009633	70010368	70010845



ステンレススチール X
[S L X] [X]



[L X] [X]



[S L X] [X]



[L X] [X]



[S L X] [X]



[L X] [X]



[S L X] [X]



[S L X] [X]



[S L X] [X]

グレイシーアクセス

包装●

- ステンレススチール **S** **L** 1本
- X** 1本
- XP **X** 1本
- XP Pro Thin **X** 1本

歯周用キュレット グレイシー アクセス
 一般医療機器 13B1X0015500073
 歯周用キュレット XP グレイシー アクセス
 一般医療機器 13B1X00155000255

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP	XP Pro Thin
ハンドルタイプ	S	L	X	X	X (XP Pro Thin タイプ)
GA00-0	70009653	70009645	70010369	70010846	-
GA1-2	70009654	70009646	70010370	70010847	10029101
GA3-4	70009655	70009647	70010371	70010848	-
GA5-6	70009656	70009648	70010372	70010849	-
GA7-8	70009657	70009649	70010373	70010850	10029102
GA11-12	-	70009650	70010374	70010851	-
GA13-14	70009659	70009651	70010375	70010852	10029103
GA15-16	-	70009652	70010376	70010853	10029104

グレイシーディープポケット

包装●

- ステンレススチール **S** **L** 1本
- X** 1本
- XP **X** 1本

歯周用キュレット グレイシー ディープポケット
 一般医療機器 13B1X0015500072
 歯周用キュレット XP グレイシー ディープポケット
 一般医療機器 13B1X00155000256

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP
ハンドルタイプ	S	L	X	X
G1-2DP	-	70009661	70010377	70010854
G3-4DP	70009669	70009662	-	70010855
G5-6DP	70009670	70009663	70010379	70010856
G7-8DP	70009671	70009664	70010380	70010857
G11-12DP	70009672	70009665	70010381	70010858
G13-14DP	-	70009666	70010382	70010859
G15-16DP	70009674	70009667	70010383	70010860



GA00-0 [前歯部]

ステンレススチール **S** **L** **X** [**X**] [-]



GA1-2 [前歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**] [**X**]



GA3-4 [前歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**] [-]



GA5-6 [前歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**] [-]



GA7-8 [臼歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**] [**X**]



GA11-12 [臼歯部 (近心)]

[-] [**L** **X**] [**X**] [-]



GA13-14 [臼歯部 (遠心)]

[**S** **L** **X**] [**X**] [**X**]



GA15-16 [臼歯部 (近心)]

[-] [**L** **X**] [**X**] [**X**]



G1-2DP [前歯部]

ステンレススチール [-] [**L** **X**] [**X**]



G3-4DP [前歯部]

[**S** **L** -] [**X**]



G5-6DP [前歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**]



G7-8DP [臼歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**]



G11-12DP [臼歯部 (近心)]

[**S** **L** **X**] [**X**]



G13-14DP [臼歯部 (遠心)]

[-] [**L** **X**] [**X**]



G15-16DP [臼歯部 (近心)]

[**S** **L** **X**] [**X**]



GA00-0

小さなブレードとまっすぐな第一シャンクにより、深く狭い下顎前歯部根面や、垂直性の歯周ポケットでも操作しやすくなっています。



American Eagle
INSTRUMENTS®

シックルスクレーラ


包装●

- ステンレススチール **L** 1本
- X** 1本
- XP **X** 1本
- XP Pro Thin **X** 1本

歯科用スクレーラ スクレーラ
一般医療機器 13B1X00155000070
歯科用スクレーラ XP スクレーラ
一般医療機器 13B1X00155000263


〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール		XP	XP Pro Thin
ハンドルタイプ	L	X	X	X (XP Pro Thin タイプ)
H5-33	70009683	70010384	70010861	-
H6-7	70009684	70010385	70010862	-
J4-U5	70009690	70010386	70010802	-
M23	-	70010792	70010803	10029105
ブラックジャック	-	-	70010801	10029106
204S	-	-	70010793	-
204SD	-	-	70010794	-

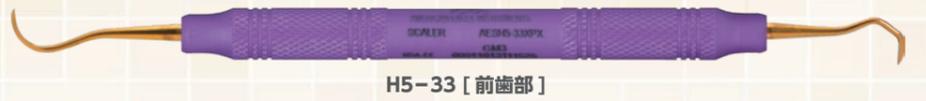

H5-33 [前歯部]

ステンレススチール **L** **X** **X** XP XP Pro Thin

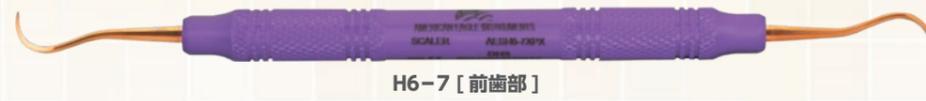

H6-7 [前歯部]

L **X** **X** [] [] []



J4-U5 [前歯部]

L **X** **X** [] [] []



M23 [全顎]

[] **X** **X** **X**



ブラックジャック [全顎]

[] **X** **X**



204S [臼歯部]

[] **X** []



204SD [臼歯部 (遠心)]

[] **X** []




細い

XP XP Pro Thin



彎曲が強い

H6-7 ブラックジャック

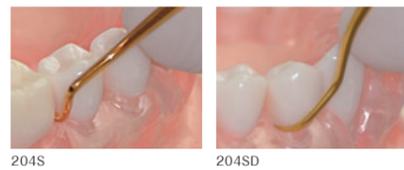

204S 204SD

204S/204SD
204SDは、204Sより第一シャンクが長いので、臼歯部遠心にアクセスしやすくなっています。

M23
全顎の歯肉縁上～縁下3mm以下の歯石除去や、チェック用として使用できるマルチタイプのスクレーラです。XP Pro Thinは、XPよりブレードが細いので、狭窄した歯間部や歯肉溝などに挿入しやすくなっています。

ブラックジャック
適度な彎曲と角度があり、叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用可能です。


チタンインスツルメント

日本オリジナルの薄いブレード設計
チタンアパットメントを傷つけにくいチタンブレードです。

包装●1本
※ハンドルは、Xハンドル(イーグルライト)のみです。
歯科用スクレーラ チタンインスツルメント
一般医療機器 13B1X00155000264



ネブラスカ ランガー N128-L5 [前歯部]

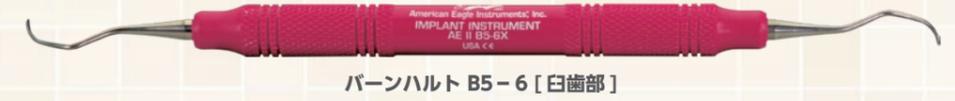

バーンハルト B5-6 [臼歯部]



ランガー L3-4 [臼歯部]



204S [臼歯部]

ファイル ハーシュフェルト

包装●1本
※ハンドルは、Sハンドルのみです。
歯科用スクレーラ ファイル ハーシュフェルト
一般医療機器 13B1X00155000112




H3-7 [頬舌・唇舌面用]



H5-11 [近遠心用]

塊となった歯石を砕く
ファイルタイプ。

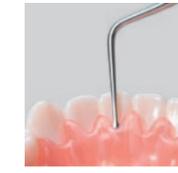

H3-7

H5-11

プローブ

包装●1本

歯周ポケットプローブ プローブ
一般医療機器 13B1X00155000049



(ブラック)WHOB



(イエロー)12Y



(ブラック)12B



(ブラック)N2B

エクスプローラー

包装●

31本

17-3 1本

(両頭) 11-12/ (両頭) 11-12DP 1本

歯科用探針 エクスプローラー

一般医療機器 13B1X00155000046



3



17-3



(両頭) 11-12



(両頭) 11-12DP

歯周治療に
おすすめ

第一シャーク

側面

チップ先端の側面に
当てる(鋭い先端は使わない)

11-12

G11-12と同じ形態で、1本で全顎の根面全体を探索できるので、根面の
歯石探知やチェックにおすすめです。Xハンドルのため軽く、触知した感覚
が伝わりやすい設計になっています。

関連製品



テストスティック

包装●

1本入/6本入




シャープニングストーン

包装●

1函:1個

※オートクレーブ滅菌(140℃以下)、薬液消毒可能
※XPシリーズ・チタンインスツルメントはシャープニング
不要

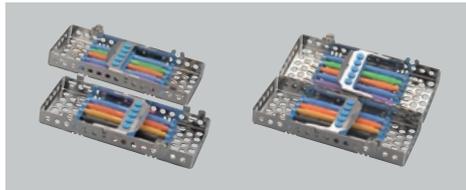

インスツルメントカセット10本用

種類●分割式、蝶番式

包装●1函:1個

※製品にインスツルメントは含まれておりません。

別売

インスツルメントカセット10本用 交換用ラバー

包装●1セット:6個



AEインスツルメント用カセット

包装●

1函:1個

※インスツルメントを5本収納できます。
※製品にインスツルメントは含まれておりません。

インスツルメントは、刃部の損傷や破折を防ぐため、カセットに入れて洗浄(超音波・
ウォッシャーディスインフェクター)、滅菌を行ってください。

※掲載情報は2024年11月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。