



歯科用多目的超音波治療器

メルサージュ エピック 2in1

MERSSAGE E-PICK 2in1

歯科用多目的超音波治療器



製品紹介の動画はコチラ▼



SHOFU INC.

Two Maintenance Systems in One



2i

n
1

MERSSAGE E-PICK 2in1



超音波スケーラーとパウダーデバイス。幅広いプロフェッショナルケアに対応する2つの高機能を、この1台に凝縮。

2つの機能を使い分ける。 より安全に。より快適に。よりスマートに。

1

1台のスペースで 2つのシステム

超音波スケーラーとパウダーデバイス。
プロフェッショナルケアに必要な2つのシ
ステムを1台に集約しました。診療現場の
省スペース化とよりスムーズな治療を実
現することを可能にしました。

2

プロフィー※・ペリオの パウダー機能を自動認識

各チャンバーを取り付けるだけで、プロフ
イー※・ペリオの機能を自動認識するので
煩わしい機能選択操作が不要。スピーデ
ィーなクリーニングから、インプラント周
囲や歯周ポケット内への優しく効率の良
いバイオフィーム除去まで、誤作動を防止
する設計で操作がスムーズに行えます。

※プロフィーチャンバーはオプションです。

ULTRASONIC



3

独立した ユニットとチャンバー

チャンバーからハンドピースまでが一体になった独立構造のため、個々のパーツ交換が可能です。万一、粉詰まりなどトラブルが発生しても、ユニットを分解するなどの面倒な修理は不要です。

4

粉詰まりしにくい スマートな発想の設計

パウダー経路がユニット内を通らないので、ユニット内での粉詰まりリスクはゼロ。ユニット内はエアと水回路だけのスマートな発想の設計です。また、チャンバーとハンドピースホースが直結しているのので、粉詰まりのリスクを軽減します。

5

2種類のパウダーが混入しない 安心安全設計

プロフィー・ペリオ、それぞれ専用のチャンバー、ハンドピース、ハンドピースホースを開発。機能を丸ごと交換するため、2種類のパウダーが混ざることなく安心して使用できます。






POWDER
PERIO-SYSTEM



POWDER MAINTENANCE

		対象
MERSSAGE E-PICK 2in1 	標準	天然歯 補綴歯
	オプション	天然歯

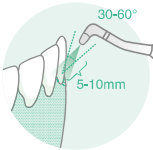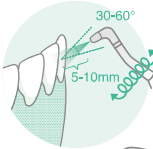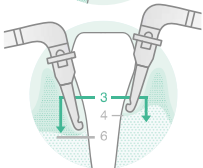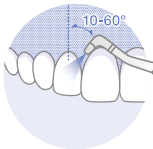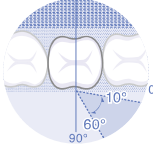

部位	使用ポイント	使用パウダー
 縁上 (歯肉辺縁)   縁下 (歯周ポケット)	  	 Perio-Mate Powder
 縁上	 	 FLASH pearl


パウダー比較表



FLASH pearl (炭酸カルシウム)
平均粒子径54 μ m SEM画像(×150)



Perio-MatePowder (グリシン)
平均粒子径25 μ m SEM画像(×150)

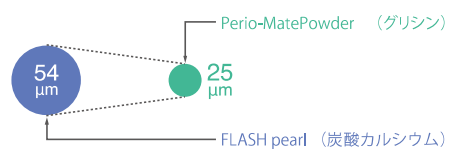


歯肉縁上、辺縁歯肉のプラーク・バイオフィルム、ステインの除去

- 歯肉縁上と歯肉辺縁など、これまで操作が難しかった部分のプラーク・バイオフィルム、軽微なステインの除去が可能。
- 歯列不正、歯間部、小窩裂溝などラバーカップでは届きにくい部分のプラーク・バイオフィルムの除去が可能。
- 広範囲に付着した軽微なステイン除去。 ● インプラント周囲、補綴修復物の清掃。 ● 縁上(プロフィシステム)より優しい噴射圧の設計。
- 非接触なので、歯牙、歯肉などへのダメージを軽減。 ● 補綴修復材料への負担を軽減。



スピーディーで、確かな除去能力

1/4顆を約50.0秒で、歯面のバイオフィルムが除去できます。


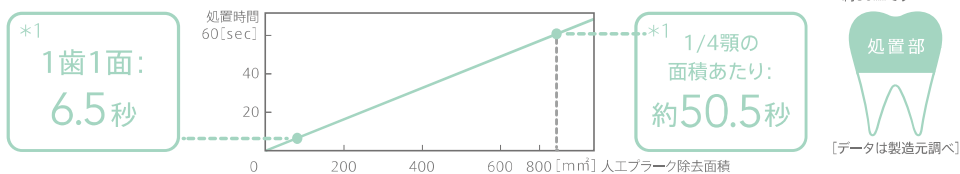


クリーニング効果

歯面清掃にグリシンパウダーを使用した場合、手用スケーラー使用時より細菌除去面積が広がります。

Petersilka GJ, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Häberlein I, Flemmig TF. Subgingival plaque removal at interdental sites using a low-abrasive air polishing power. J Periodontol. 2003 Mar; 74(3):307-11
(口腔内分割法を用いて、グリシンパウダーと手用スケーラーを使用し、プラークを除去した結果)

- 主成分のグリシンはタンパク質の構成物質であるアミノ酸
- 歯肉縁下に使用しても滞留しない高い水溶性
- 象牙質よりも柔らかいモース硬度 ※モース硬度: グリシン〜2/象牙質2〜2.5
- パウダー平均粒子径: 25 μm

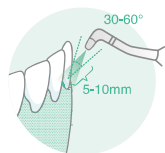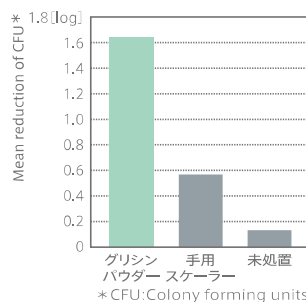


【使い方】

歯肉辺縁(ポケット内3mm未満程度まで)のバイオフィルムの除去

ノズルを歯肉辺縁に向け、歯面に対して図のような距離と角度でスプレー噴射を行います。

この時、歯面全体にスプレー噴射するようにゆっくり動かします。

※ノズルを歯面より2mm以上近づけてしまうと除去能力が下がってしまうので、歯面とノズルの距離は注意して操作を行います。

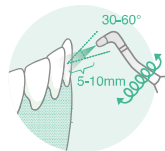

軽微なステインの除去

ノズルを歯面に向け、歯面に対して図のような距離と角度でスプレー噴射を行います。

この時、小さく円を描くように動かします。



Perio-Mate Powder(グリシン)

平均粒子径25 μm SEM画像(×150)

Perio-Mate Powder

製品名: ペリオメイト パウダー

製品番号: 9966062

・数量: 160g×2本入り

販売名: ペリオメイト パウダー 一般的名称: 歯面研磨材
届出番号: 09B2X00016000139 一般医療機器



標準セット

POWDER PERIO-SYSTEM



歯周ポケット内のプラーク・バイオフィルムの除去

- 1ブロック面積あたり(例＝臼歯部4～5本)約60秒で、歯周ポケット内バイオフィルムを除去。
- チップと付着物が非接触で広範囲に除去できるため、届きにくい箇所も清掃が可能。
- 解析により最適化されたパウダーの流れを実現。
- 目視できない箇所でも、広範囲のパウダー噴射による清掃が可能。バイオフィルムやプラーク等の取り残しが大幅に減少。
- 柔らかなパウダー噴射で、歯周ポケット内を傷つけず、優しくトリートメント。
- アクセス性と歯肉への安全性を追求した、柔軟性のあるプラスチックノズルを採用。
- 補綴修復材料へのダメージを軽減。



噴射力の自動調整

ペリオ用チャンバーを接続すると、歯肉縁下での使用に合わせ、噴射力がプロフィーモードのパワーから自動的に20%低下します。(噴射部位や患者さまの状態を見てパウダー流量と水量を調整してください。口腔内の状況に合わせて、低いパワーから徐々に設定を上げていくことをお勧めします。)


歯周ポケット内に適したパウダーの流れ

歯周ポケット内を考慮した噴射が可能。全方向への均一な流れにより、軟組織へのダメージを最小限に抑え、歯肉縁下のプラーク・バイオフィルムを効率的に除去します。パウダー(エア)・水は歯周組織へのダメージに配慮し、別噴射となっています。



アクセス性と歯肉への安全性を追求した、柔らかいプラスチックノズル

細くて薄く、柔軟性のあるノズルチップは、歯牙の豊隆に沿ってしなやかに曲がるので、引き締まった歯肉や隣在歯の根面への挿入も容易で、患者さまの苦痛を軽減。視認性の良い半透明の材質により、歯肉縁下への挿入も快適。ノズルチップは患者さまごとに交換するディスポーザブルタイプ。滅菌済で開封直後に使用可能です。

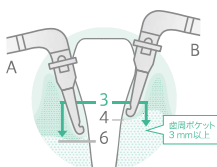

【使い方】

歯周基本治療の終了した歯肉縁下3mm以上6mm未満の歯周ポケット内バイオフィルムの除去

①ノズルチップを治療に適した3mm以上の歯周ポケット位置までゆっくり挿入してください。


この時、それぞれの患者さまのポケット数値に応じて挿入する深さを調節してください。

※3mm以内の挿入ですと歯周ポケット内へ効率良くパウダーが噴射されない場合があります。

A: 歯周ポケット6mm未満の場合 B: 歯周ポケット4mmの場合



②1歯1面約5秒・計20秒までの噴射で使用します。

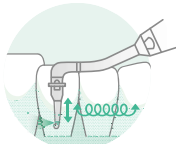

③ノズルチップはパウダーの噴射方向に沿って横方向に移動させながら、歯面の縦方向の往復や小さく円を描くように動かすのがポイントです。

※ペダルを離した後に、パウダーケース内のエア圧力が抜けるまでパウダーが噴射される場合があります。パウダーの噴射が止まるまでバキューム等で吸い取り、口腔内にそのままパウダーが噴射されないよう注意してください。

Perio-Mate NOZZLE TIP

製品名: ペリオメイト ノズルチップ

製品番号: 9966058

・数量: 40本入り

・ディスポーザブルタイプ

・滅菌済み

販売名: ペリオメイト ノズルチップ

一般的名称: 歯科用注入器具


届出番号: 09B2X00016000140 一般医療機器

実寸サイズ



標準セット


POWDER PERIO-SYSTEM

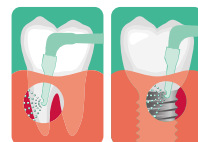

OPTION

パワフルで安定したパウダー噴射

チャンバー内での効率的なパウダーの流れを実現。パウダー・水・エアーのスムーズな噴射を実現。チェアタイムを短縮しつつ、効率良く成果を得られます。

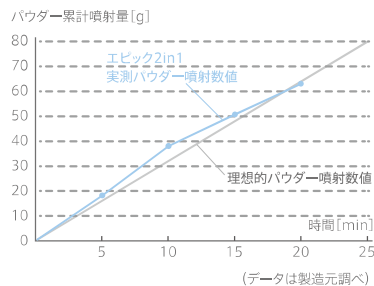


ハンドピースとノズルの高い操作性

口腔内で操作しやすいスリムなハンドピース。長く小さなノズルは、白歯部などへのアプローチを容易にします。頬側では必要以上にハンドピースで口角を広げることなく、舌側では広い術野の確保が術者と患者さまの負担を軽減します。



【使い方】

ノズルを歯面に対して図のような角度で、球体粒子のパウダーを歯面に転がすイメージでスプレー噴射を行います。

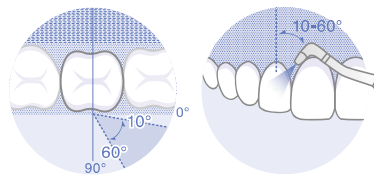

広範囲のステイン・バイオフィルムの除去

ノズルを5mm～10mm程度離し、歯面全体にスプレー噴射するようにゆっくり動かします。

局所のステイン・バイオフィルムの除去

ノズルを3mm～5mm程度離し、ピンポイントでのスプレー噴射を行います。

【仕上げ研磨】

術後は新たな着色予防、歯面を滑らかにすることを目的に、研磨粒子の細かいペースト（メルサーージュ プラス）やメルサーージュカップなどを使用して低速回転で仕上げ研磨することをお勧めいたします。

オプション

POWDER PROPHY-SYSTEM



オプション

ACCESSORIES


FLASH pearl フラッシュパール歯面清掃用パウダー

快適。爽快。クリーニング体験。

短時間で効果的な施術が可能な“フラッシュパール”は、マイルドな味で刺激が少なく、患者さまに優しい歯面清掃用パウダーです。高いクリーニング力となめらかな仕上がりの秘密は、カルシウムベースの球体粒子。平均 $54\mu\text{m}$ の細かいパウダーが歯面を転がるように動くので、歯面へのダメージを抑え、スピーディーにバイオフィームやステインを落とします。患者さまが定期的に歯面清掃を行うモチベーションアップにつながります。

歯面にやさしい球体粒子

球体状の細かい粒子で構成されたパウダーが歯面上を転がるように動き、ステインやバイオフィームなどをやさしくスピーディーに取り除きます。

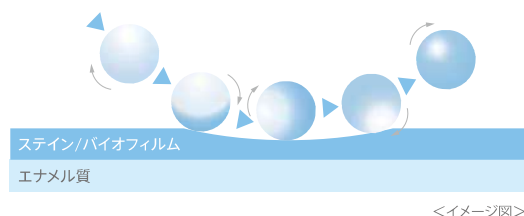

<イメージ図>

フラッシュ
パール

電子顕微鏡によるパウダーポリッシング後の歯面の状況



FLASH pearl(炭酸カルシウム)

平均粒子径 $54\mu\text{m}$ SEM画像($\times 150$)

“塩分ゼロ”患者さまにやさしい成分

成分の94%が炭酸カルシウムなので、塩からさを感じず患者さまに不快感を与えません。ナトリウムフリーにより、塩分摂取制限のある患者さまにも使用できます。



スピーディーなクリーニング効果

フラッシュパールを使用することでスピーディーに、より滑らかな歯面に仕上がります。フラッシュパールはカルシウムベースで球体状の細かい粒子で構成されており、パウダーが歯面上を転がるように動いて、強固に付着したステインやバイオフィルムを効率良く取り除きます。



粉詰まり軽減

粒子がとても細かく水に溶けにくいので、粉詰まりが軽減できます。また器具内でのパウダー目詰まりも少なくメンテナンスも簡単です。

FLASH pearl

製品名:フラッシュパール(100袋入)

製品番号:9966060

・15g×100袋

販 売 名:フラッシュパール

一般的名称:歯面研磨材

届 出 番 号:

09B2X00016000034

一般医療機器



製品名:フラッシュパール

(ボトル4本セット)


製品番号:9966061

・300g×4本



ULTRASONIC



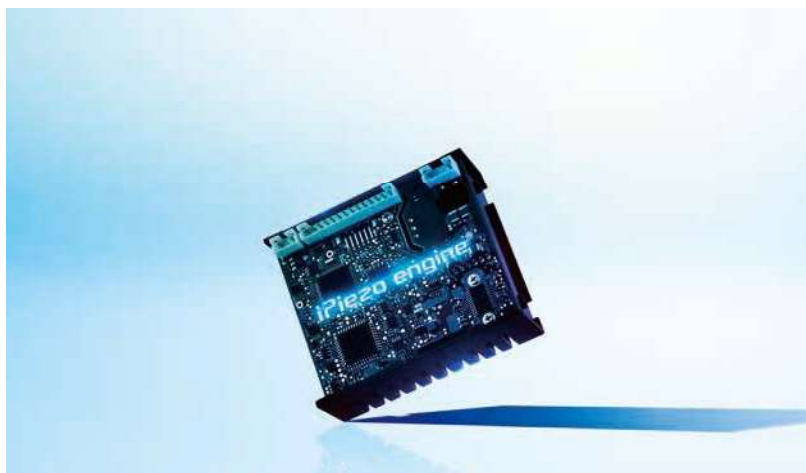

iPiezo engine[®] アイピエゾ エンジン

さまざまな状態の歯石に対応する「iPiezo engine[®]」搭載

「もっと上手にスケーリングをしたい」「もっと簡単に歯石を取りたい」
 歯科衛生士の現場の声を真剣に採り入れ開発した、次世代超音波エンジン。
 メルサージュ エピックスシリーズに搭載し、まるで自分の手のようにチップへ術者の意図が伝わり、
 歯面の状況に合わせた思い通りの操作が可能。
 スピーディーな施術で、患者さまにとっても優しいスケーリングを実現しています。
 また、効率良くパワーを出力でき、省電力にも優れたエコエンジンです。

フィードバック機能


硬い歯石、柔らかい歯石、歯面の状態に合わせて常にチップ先端に適正なパワーを供給。硬く取れにくい歯石に対しても、パワーが落ちることなく安定したスケーリングを行います。

オートチューニング機能

チップ先端で常に設定パワーが発揮される様に、発振周波数を自動調整。チップの暴れやバタつきを最小限に抑えるため、吸い付くようにチップが歯面を捉え、歯面状況が手指に的確に伝わります。

常に安定したスケーリングが可能

メルサージュエピックスシリーズはiPiezo engine[®]の働きにより、自動的にチップ先端にかかる負担を感知し、パワーを落とすことなく常に安定したスケーリングが行えます。

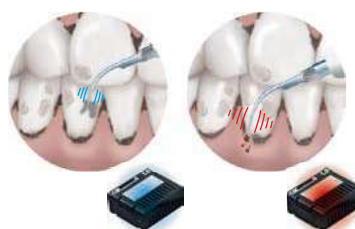

ULTRASONIC




正確で安全な操作性を重視したスリムハンドピース

口腔内での広い作業域、術野の広さを実現した先端がΦ9.5mmのスリムハンドピース。細い先端部はアクセスが困難な最後臼歯遠心などへのアプローチをスムーズにし、常にチップを正しい角度で当てることが可能。グリップ感が高く、軽量ハンドピースは手指への負担を大きく軽減します。また、自然光に近いLED光と広い照射範囲により、常に広く明るい視野と高い認識性を実現しました。



臨床術式の可能性を広げるラインナップ

症例や形状の違い以外にも断面や材質、表面の加工などにも違いがあり、症例や付着物の状態に合ったチップの選択で、歯面や軟組織に負担を軽減した効率的な治療を実現します。

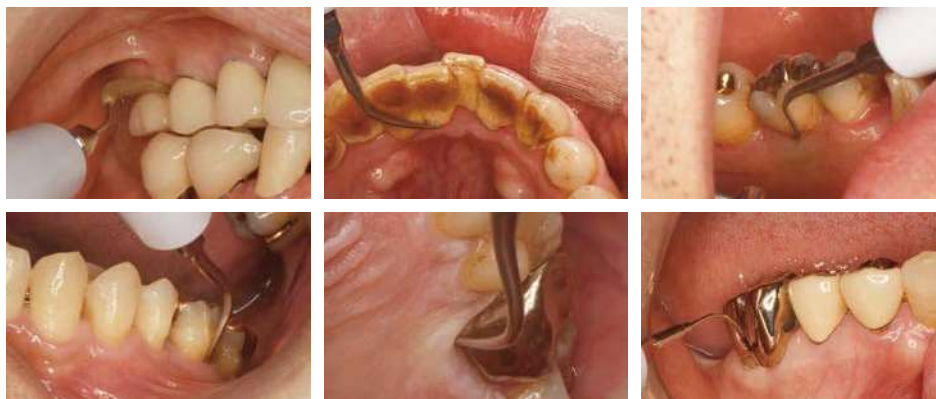

安全性に配慮した、オートクレーブ滅菌と熱水洗浄にも対応

🚰熱水洗浄可能 🧺135℃までの温度でオートクレーブ可能

ACCESSORIES (TIP)

スケーリング／イリゲーション／ペリオ

製品名 S-G0

製品番号 | 9967G0

主に歯肉縁上、歯間部の除石に適したチップです。



製品名 S-G6

製品番号 | 9967G6

主に歯肉縁上、縁下の除石に適したチップです。狭い歯間部などにも無理なくアクセスできます。



製品名 S-P1

製品番号 | 9967P1

前歯から小臼歯のメンテナンス、ルートブレーシングの仕上げに適したストレートタイプの形態をしたチップです。とても細いので隣接面・齦生部へも無理なくアクセスできます。



製品名 S-P20

製品番号 | 9967P20

断面が丸く歯面にキズが付きにくいのでメンテナンスや仕上げに適しています。細長い形態でポケット内へのアクセスがスムーズに行える全顎的に使用できるチップです。



製品名 S-P40

製品番号 | 9967P40

チップの先端から6mmのところに3mm幅のガイドラインマーキングを施していますので、ポケットの深さや目的に合わせ、安全に挿入できます。



インプラント・補綴装置メンテナンス

製品名 S-V10(ホルダー)

製品番号 | 9967V10

・Eチップ用レンチ付属



製品名 S-V-P10(3入)

製品番号 | 9967VP10

インプラント体やポーセレンなどの補綴装置のメンテナンスに適したチップです。
・プラスチック素材

製品名 S-V-P12(3入)

製品番号 | 9967VP12

S-V-P10のロングタイプチップです。ブリッジの基底面や、到達しにくかった床付きのインプラント上部構造など歯冠長の長い症例でも、容易にアクセスすることができます。
・プラスチック素材

エンド 根管拡大・形成用 シャンクφ1.5mm

製品名 S-V-S51D(3入)

製品番号 | 9967VS51D

ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用23mm



製品名 S-V-S52D(3入)

製品番号 | 9967VS52D


ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用26mm



製品名 S-V-S53D(3入)

製品番号 | 9967VS53D

ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用32mm

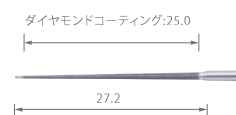


エンド 根管洗浄用

製品名 S-E4

製品番号 | 9967E4

根管内イリゲーション用チップ。根管内異物除去用としても使用できます。
・Eチップ用レンチ付属

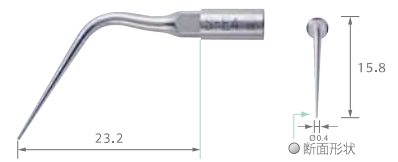

製品名 S-E9 (ホルダー)

製品番号 | 9967E9


Uファイル用ホルダーです。約90°のタイプです。
・Eチップ用レンチ付属



製品名 S-V30 (ホルダー)

製品番号 | 9967V30


・Eチップ用レンチ付属

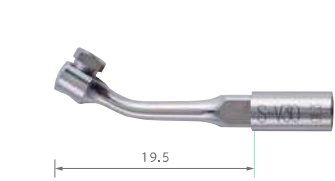

製品名 S-E12 (ホルダー)

製品番号 | 9967E12

Uファイル用ホルダーです。120°のタイプです。
・Eチップ用レンチ付属

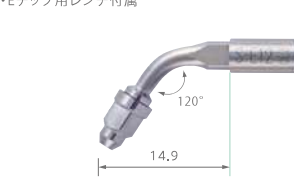


エンド 根管洗浄用 シャンクØ1.5mm

製品名 S-V-S50 (3入)

製品番号 | 9967VS50


ステンレス、根管洗浄用17mm

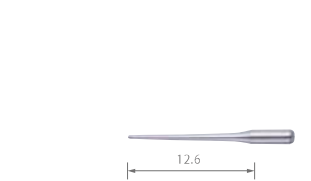

製品名 S-V-S51 (3入)

製品番号 | 9967VS51

ステンレス、根管洗浄用23mm

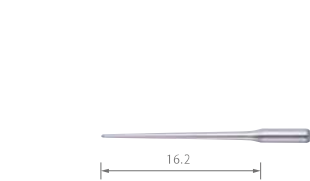

Uファイル 長さ33mm シャンクØ0.8mm

製品名 Uファイル#15 (6入)

製品番号 | 9967U15

製品名 Uファイル#20 (6入)

製品番号 | 9967U20

製品名 Uファイル#25 (6入)

製品番号 | 9967U25

製品名 Uファイル#30 (6入)

製品番号 | 9967U30

製品名 Uファイル#35 (6入)


製品番号 | 9967U35



製品名 S-V-S53 (3入)

製品番号 | 9967VS53


ステンレス、根管洗浄用32mm

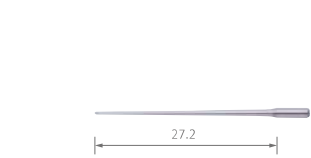

製品名 S-V-N50 (3入)

製品番号 | 9967VN50


ニッケルチタン、根管洗浄用26mm、ストレートタイプ

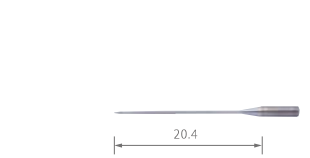

製品名 S-V-N51 (3入)

製品番号 | 9967VN51

ニッケルチタン、根管洗浄用30mm、ストレートタイプ

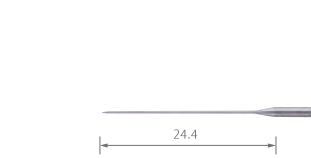

MAINTENANCE



✕ 優れたメンテナンス性

オートクリーニング機能で手軽な清掃

オートクリーニングキーを押すだけで超音波機能、パウダー機能、それぞれのハンドピース、ハンドピースホース内を簡単に清掃することが可能です。
(クリーニング時間は各約45秒)



【超音波機能】 ユニット内の注水経路を自動的に洗浄します。
消毒液使用後などに行うことで、経路の腐食等のリスクを軽減します。

【パウダー機能】 ホース、ハンドピース内に残った残留水をほぼゼロまで排出し、
粉詰まりリスクを軽減。患者さまごとのお手入れが可能です。

手軽なメンテナンス

ユーザー自身の手でノズル、ハンドピース、ハンドピースホース、チャンバーを簡単に分解することができ、きめ細かい製品メンテナンスが可能です。



OPERATION

優れた操作性

操作性へのきめ細かな配慮

超音波スケーラーとパウダーの機能を自動認識

超音波モードとパウダーモードは、ハンドピースを持ち替えるだけで自動で切り替わります。パウダーモードのプロフィー・ペリオ機能は、チャンバー交換時に自動認識します。




超音波モード使用




パウダーモード使用

前回使用した機能設定を記憶

機能毎に、前回使用したそれぞれのモードやボトル水量、パワーの設定を記憶することが可能です。

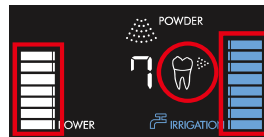

プロフィーモード使用

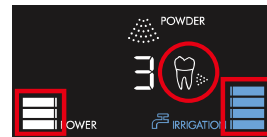

ペリオモード使用


マルチに使えるフットコントローラー

足の踏み方の感覚を追求して開発されたマルチフットコントローラー。モード切替、パワー設定やリンス機能の選択など、フットコントローラーによってユニット操作のハンズフリー化を実現。フットコントローラーを活用することで、施術を中断することなく必要な操作を行うことができます。




超音波モード

歯周治療だけでなく、エンド治療に対応する微細なパワーの調整が可能なP,E,Gの3つのモード切替と10段階の細かいパワー調整が行えます。

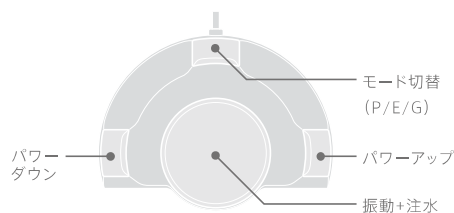

パウダーモード

口腔内の状況に応じて、10段階のパウダー流量調整が行えます。また、リンス機能はエアと水が噴射され、患部の洗浄が可能です。3wayシリンジに持ち替えなくても、スイッチ一つで口腔内の残留パウダーの洗い流しが行えます。

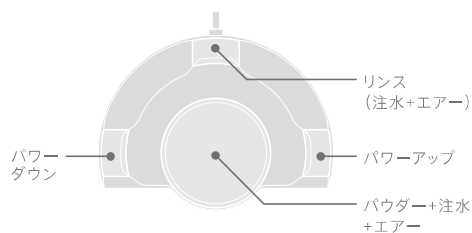

MERSSAGE E-PICK 2 in1 標準セット



製品名:メルサーージュ エピック 2in1

製品番号:9964

セット内容

- | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ・コントロールユニット | ・エピック2in1フットコントローラー | ・ペリオメイトノズルチップリムーバー |
| ・パウダーハンドピース(ペリオ用) | ・エアース | ・チップ3本(S-G0、S-G6、S-P20) |
| ・パウダーハンドピースホース(ペリオ用) | ・注水タンクセット(角型) | ・チップ交換用レンチ(3個) |
| ・チャンバー単品(ペリオ用) | ・水チューブ組付 | ・滅菌ケース |
| ・スケーラーハンドピース(ライト付) | ・ペリオメイトパウダーボトル(160g×1本) | ・電源コード |
| ・スケーラーハンドピースコード | ・ペリオメイトノズルチップ(40個入) | ・2in1用付属品セット |

仕様

- | | |
|--------------------------|---|
| ・電源:AC 100V-240V 50/60Hz | ・ユニット寸法:W225×D290×H162mm(注水タンク、チャンバー含む) |
| ・駆動周波数:28-32kHz | ・ユニット重量:2.6kg<注水タンク、チャンバー(ペリオ用)除く> |
| ・最大出力:11W | |

販売名:メルサーージュ エピック 2in1 認証番号:229ALBZX00017A01 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

OPTIONS

製品名:メルサーージュ エピック 2in1 チャンバーキット(ペリオ用)
製品番号:996501

キット内容

- ・パウダーハンドピース(ペリオ用)
- ・パウダーハンドピースホース(ペリオ用)
- ・チャンバー単品(ペリオ用)
- ・ペリオメイトパウダー(160g×1本)
- ・ペリオメイトノズルチップ(40本入)
- ・ペリオメイトノズルチップリムーバー



製品名:メルサーージュ エピック 2in1 チャンバーキット(プロフィー用)
製品番号:996502

キット内容

- ・パウダーハンドピース(プロフィー用)
- ・パウダーハンドピースホース(プロフィー用)
- ・チャンバー単品(プロフィー用)
- ・フラッシュパール(15g×5袋)




製品名:iCART-L
製品番号:9966064

- ・外寸法:W360×D420×H800mm
- ・重量:10kg



SPARE PARTS／ACCESSORIES

メルサーージュ エピック 2in1

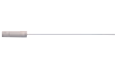製品名	製品	製品番号		製品名	製品	製品番号	
チャンバー単品 (ペリオ用)		9966001		Oリングセット (注水タンク 角型用)		9966021	
チャンバー単品 (プロフィー用)		9966002		Oリングセット (ハンドピースホース用、 プロフィー・ペリオ共通)		9966022	
パウダーハンドピースホース (ペリオ用)		9966005		Oリングセット (ノズル用、プロフィー・ ペリオ共通)		9966023	
パウダーハンドピースホース (プロフィー用)		9966006		スケーラーハンドピース (ライト付)		9966010	
パウダーハンドピース (ペリオ用)	 	9966003		滅菌ケース	 	9966013	
パウダーハンドピース (プロフィー用)	 	9966004		水供給用 コネクター		9966048	
パウダーハンドピース用 ノズル (ペリオ用)	 	9966007		ケース付 水フィルター		9966049	
パウダーハンドピース用 ノズル (プロフィー用)	 	9966008		水フィルター		9966050	
パウダー ハンドピース ノズル用リングレンチ	 	9966030		チップ交換用レンチ (CR-10)	 	9966052	
注水タンクセット (角型)		9966014		Eチップ用レンチ	 	9966053	
スケーラー ハンドピースコード		9966011		チップホルダー	 	9966054	
フットコントローラー (2in1用)		9966009		チップカバー (L)	 	9966055	
水フィルターセット (3.6m グリーン)		9966017		チップカバー (S)	 	9966056	
注水ポンプ (2in1用)		9966018		ペリオメイト ノズルチップリムーバー	 	9966059	
Oリングセット (パウダーチャンバー 本体接続部用)		9966019		パウダー ハンドピース用 タービンオイル		9966031	
Oリング (スケーラーハンドピース コード用)		9966041		パウダー清掃用 ワイヤー (大)		9966027	

 熱水洗浄可能  135℃までの温度でオートクレーブ可能

製品名	製品	製品番号	
パウダー清掃用 ワイヤー (小)		9966026	
パウダー清掃用 ファイル (ノズル用)		9966025	
パウダー清掃用ブラシ		9966028	
パウダーチャンバー蓋 (プロフィー、ベリオ共通)		9966024	
注水タンク蓋 (角型)		9966015	
注水タンク (角型 蓋なし)		9966016	
電流ヒューズ		9966033	
ロック解除ピン		9966029	

製品名	製品	製品番号	
電源コード		9966051	
チューブストッパー		9966046	
防塵カバー		9966044	
スパナ (5×8) 2個入		9966057	
エアースホース		9966032	
チューブ抑えリング (2個セット)		9966036	
ゴム足		9966047	

商品説明 パーツ交換説明はコチラ!!

リングレンチ			Oリングセット (ノズル用、プロフィー・ ベリオ共通)		
注水ポンプ			水供給用 コネクター		
Oリングセット (パウダーチャンバー接続部)			水フィルター		
Oリングセット (ハンドピースコード用)			タービンオイル		
Oリングセット (注水タンク用)			電流ヒューズ		
Oリングセット (ハンドピースホース用、 プロフィー・ベリオ共通)			ロック解除ピン		

MERSSAGE E-PICK 2in1

仕様および形状は申告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ご使用の際は添付文書、取扱説明書等をよく読んでお使いください。

取扱い店

製造販売元 株式会社 ナカニシ 栃木県鹿沼市下日向700

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp

2005DJJSi